


LA BONNE PRATIQUE POUR EFFECTUER UNE CYTOLOGIE CERVICALE ET/OU UN TEST HPV

1 - UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LES FLACONS PRECONISES PAR BIOPATH-OI (flacon BD Surepath) et le Cervex Brush en vérifiant la date de péremption.



Flacon BD SurePath et Cervex Brush

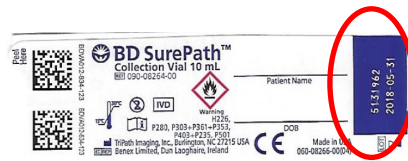


Date de péremption sur la tranche de l'étiquette du flacon.

NB : les informations sur les dates de péremption (Pot BD SurePath et dispositif CervexBrush) sont reprises sur la boîte de matériel qui vous est livrée.

BD SurePath x25
Lot 9091872
Exp.31/03/2022
Cervex Brush x25
Lot 39335
Exp.01/05/2022


2 - PRELEVEZ

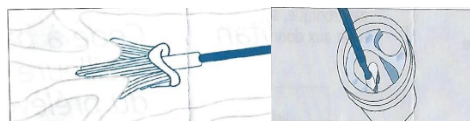

Appliquez le cervex brush au niveau du col.
Faites 3 tours à 360 ° en évitant de faire saigner.
Insérez la tête du dispositif de prélèvement dans la plus large ouverture du flacon.
Tournez le manche du dispositif pour bloquer la tête.
Tirez-le délicatement vers le haut pour détacher la brosse.

Transmettre le pot avec la brosse détachable à l'intérieur
= 100% des cellules prélevées sont transmises au laboratoire pour un résultat optimal

3 - IDENTIFIEZ

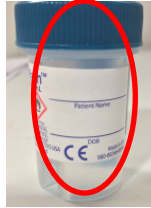

Inscrire le nom/prénom sur le pot

+

Coller l'étiquette 2D sur la demande d'examen pour une meilleure traçabilité



Pour une identification correcte, il est impératif que le nom/prénom de la patiente soient indiqués sur le flacon et sur le bon de demande d'examen.

4 - TRANSMETTEZ

Insérez le prélèvement dans le sachet transparent et la feuille de demande renseignée dans la pochette prévue à cet effet.

! Un seul patient par sachet.