

LA BONNE PRATIQUE POUR EFFECTUER UNE CYTOLOGIE CERVICALE ET/OU UN TEST HPV

1 - UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LES FLACONS PRECONISES PAR BIOPATH-OI (flacon BD Surepath) et le Cervex Brush en vérifiant la date de péremption.




Flacon BD SurePath et CervexBrush

Date de péremption sur la tranche de l'étiquette du flacon.

NB : les informations sur les dates de péremption (Pot BD SurePath et dispositif Cervex Brush) sont reprises sur la boîte de matériel qui vous est livrée.

BD SurePath x25 Lot 9091872 Exp.31/03/2022
Cervex Brush x25 Lot 39335 Exp.01/05/2022

2 - PRÉLEVEZ

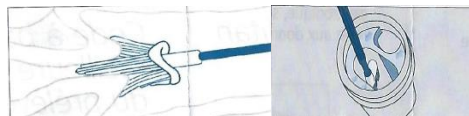


Appliquez le cervex brush au niveau du col.
Faites 3 tours à 360 ° en évitant de faire saigner.
Insérez la tête du dispositif de prélèvement dans la plus large ouverture du flacon.
Tournez le manche du dispositif pour bloquer la tête.
Tirez-le délicatement vers le haut pour détacher la brosse.

Transmettre le pot avec la brosse détachable à l'intérieur

= 100% des cellules prélevées sont transmises au laboratoire pour un résultat optimal

3 - IDENTIFIEZ

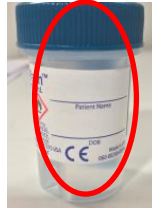

Inscrire le nom/prénom sur le pot

+

Coller l'étiquette 2D sur la demande d'examen pour une meilleure traçabilité



Pour une identification correcte, il est impératif que le nom/prénom de la patiente soient indiqués sur le flacon et sur le bon de demande d'examen.

4 - TRANSMETTEZ

Insérez le prélèvement dans le sachet transparent et la feuille de demande renseignée dans la pochette prévue à cet effet.
! Un seul patient par sachet.