

INNOVATION

Rendu détaillé des géotypes HPV



- Nous passons d'un typage limité (HPV 16, 18, Pool) à **une analyse complète**.
- Géotypes détectés :

16	18	39	33	45	35	59	66
51	53	68	52	56	58	31	

Modernisation de notre chaîne analytique HPV

Nous faisons évoluer nos automates et notre technologie PCR afin de vous proposer des résultats plus précis, pour une prise en charge optimale de vos patientes.

Ce qui change pour vous :

	ANCIEN PROCESSUS	NOUVEAU PROCESSUS
Pot	BD	Alphapath Cyt-ALL
Génotypage	Partiel HPV 16, 18, Pool	Génotypage complet 15 géotypes recherchés
Identification du prélèvement	QR Code	Manuelle

Pas de changement de technique de prélèvement
Il reste nécessaire de détacher la brosse
Vous et vos patientes bénéficiez de résultats enrichis

Guide rapide d'utilisation

Pot Alphapath Cyt-ALL

Pour assurer la qualité des analyses, veuillez suivre les consignes suivantes.

1. Prélèvement

- Mode de prélèvement **habituel**
- **Détacher la brosse** à l'aide du bouchon
- La brosse doit **impérativement rester dans le pot**

Scannez-moi



Pour un tuto vidéo !

2. Identification

- Écrire lisiblement sur le pot :
Nom & Prénom Date de naissance
- Compléter également le bon de demande habituel
([version numérique disponible sur le site de Biopath OI](#))

Calendrier de transition des pots :

PÉRIODE	POTS DISTRIBUÉS PAR LE LABORATOIRE
De janvier à février 2026	BD / Alphapath
à partir de mars 2026	Alphapath

Objectif : bascule complète au deuxième trimestre 2026

Commande de matériel

Et informations

- Via votre **coursier**
- Par mail à l'adresse secretariat@biopathoi.com
- Par téléphone au 0262 33 44 33



BIOPATH-oi
PATHOLOGISTES
DE L'OCEAN INDIEN